

# Verino Pro

## Anterio Nasal

### Vorderer Nasenabstrich

#### ANTIGEN-VP-SETS-AN

CE 1434

PEI: TEST ID (PROF. USE): AT823/21

PEI: TEST ID (SELF-TEST): AT1281/21

EU COMMON LIST: DEVICE ID: 2100



#### Immuno-graphischer In-vitro Schnelltest

##### SPEZIFIKATIONEN

- CE-zertifiziert für die Laientestung (CE: 1434)
- Geprüft durch das Paul-Ehrlich-Institut. (Test ID: AT1281/21)
- Anterio Nasler Abstrich (vorderer Nasenbereich)
- Sehr einfache Handhabung
- Zeitsparend - Schnelles Ergebnis in 15 Minuten
- Videoanleitung
- In Österreich BASG und in Deutschland BfArM gelistet

##### LAGERBEDINGUNGEN

In einem trockenen gut belüfteten Raum (2°-30° C),  
Anwendung bei 15°- 30° C.

##### VERPACKUNGSEINHEITEN UND INHALT

**Packungsgrößen: 5 Stk / Box**

- Testkassette
- Steriler Tupfer
- Probenröhrchen (Pufferlösung vorabgefüllt)
- Gebrauchsanweisung

##### ANWENDUNG

Der Abstrich wird aus dem vorderen Bereich der Nasenlöcher (Links und Rechts) entnommen. Nach der Entnahme der Probe geben Sie den Abstrichtupfer in das Röhrchen mit der Pufferlösung. Drücken Sie das Röhrchen im unteren Bereich zusammen und drehen Sie den Tupfer. Nach kurzem beiseite stellen des Probenröhrchens kann man nun 2 Tropfen der Lösung auf die Testkassette geben. In 15 Minuten sehen sie nun das Ergebnis.

##### LEISTUNGSMERKMALE

Geprüft durch das Paul-Ehrlich-Institut.

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest wurde mit einer kommerziellen PCR verglichen.

Die Gesamtsensitivität 96,1%

Die Gesamtspezifität beträgt 99,2%

Die Gesamtübereinstimmungsrate beträgt 98,7%

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen der Gebrauchsanweisung